

CEREDA-FUNKBOX

Komponenten Anlernen



Schritt 1

Funkbox auf einen Taster mit Magnetsteckkontakt aufstecken.

Schritt 2

Im Lieferumfang der Cereda-Funkbox ist ein RJ10-Stecker mit Kabelbrücke enthalten. Stecken Sie diesen RJ10-Stecker in die RJ10-Buchse der Funkbox.

Schritt 3

Ziehen Sie den RJ10-Stecker wieder aus der Funkbox und lösen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Funksender aus. Dabei wird der Code in die Funkbox geschrieben und der Sender (z.B. Funk-Sender, Funk-Trittmatte etc.) ist angelernt.

Soll ein anderer Sender eingelernt werden, wiederholen Sie die Schritte 2–3. Der vorherige Funkcode wird gelöscht und der neue gespeichert.



Funkbox

Artikelnummer
RA-FA-082



Funk-Trittmatte

Artikelnummer
RA-FA-094



Funk-Sender

Artikelnummer
Halsband: RA-FA-084
Armband: RA-FA-089

