



CEREDA ZELO-FL24

Handbuch Rufanlage



SYSTEM
PARTNER





ONLINE SERVICE-CENTER

Administrative Anpassungen, Meldung kleinerer technischer Störungen.

www.comline-pflege.de/service



ONLINE-SHOP

Komponenten und Ersatzteile für Cereda-Rufanlagen sicher und bequem online kaufen.

www.comline-pflege.de/cereda



INHALT

1. Definitionen

1.1 Ruf	4
1.2 Anwesenheit	4
1.3 Rufabstellung	4
1.4 Rufarten	5

2. Zimmerkomponenten

2.1 Zimmersignalleuchte	6
2.2 Zimmerdisplay	7
2.3 Ruftaster	8
2.4 Anwesenheits- und Abstelltaster	8
2.5 Ruf- und Anwesenheitstaster	8
2.6 Ruf- und Abstelltaster WC	8
2.7 Birntaster	9
2.8 Zugtaster	9
2.9 Kombi-Zugtaster	9
2.10 Pneumatiktaster	10

3. Komponenten einlernen/auslernen

3.1 Birntaster einlernen	10
3.2 Birntaster auslernen	10

4. Funkbox – Komponenten einlernen 11

1. DEFINITIONEN

1.1 Ruf ■

 In Notfällen oder bei Unterstützungsbedarf.

- » Mit dem Ruf können Bewohnerinnen und Bewohner Hilfe anfordern.
- » Ein Ruf wird mit der roten Taste (z.B. am Zimmerdisplay, Ruftaster, Birntaster), am roten Zugseil (Bad/WC) oder über Betätigung des Balls am Pneumatiktaster (Pflegebäd) ausgelöst.

1.2 Anwesenheit ■

 Nach Rufauslösung bei Betreten des Raumes durch das Pflegepersonal.

- » Die Anwesenheit dient dazu, die Anwesenheit einer Pflegekraft im Bewohnerzimmer oder -bad zu markieren. Hierdurch wird signalisiert, dass der ausgelöste Ruf betreut wird.
- » Eine Anwesenheit wird durch Drücken der grünen Taste (Zimmerdisplay) gesetzt.
- » Ist die Anwesenheit am Zimmerdisplay gesetzt, können Diagnostikgeräte wie Ernährungspumpen und Trittmatten keinen Ruf auslösen.

1.3 Rufabstellung ■

 Nach erledigter Pflegeleistung durch das Pflegepersonal.

- » Durch die Rufabstellung wird ein Ruf quittiert, d.h. als erledigt markiert.
- » Vor der Rufabstellung muss zuvor die Anwesenheit im jeweiligen Zimmer am Zimmerdisplay (grüne Taste) markiert werden. Auch bei WC-Rufen ist die Anwesenheit über das Zimmerdisplay zu setzen. Erst dann lässt sich der Ruf abstellen.
- » Die Rufabstellung erfolgt durch Drücken der grünen Taste (Zimmerdisplay) oder grauen Taste (Bad/WC).
- » Rufe aus dem Bewohnerzimmer (Ruftaster, Birntaster) können nur über das Zimmerdisplay abgestellt werden.
- » Rufe, die über den Zugtaster ausgelöst werden, können nur über den Ruf-/Abstelltaster Bad/WC (graue Taste) oder den Kombi-Zugtaster (grüne Zugschnur) abgestellt werden.

1.4 Rufarten

Normalruf

Ruf, der von Bewohnern über Birntaster oder Ruftaster im Zimmer getätigt wird.

Ereignisse:

- Zimmersignalleuchte: Rote LED leuchtet dauerhaft.
- Dienstzimmer-Display: Ruf wird (mit Informationen wie Zimmer-Nr.), im Display angezeigt.
- Dienstzimmer-Display: Akustisches Signal (Piepton) wird ausgelöst.
- Gerät der Rufauslösung (Taster): Rote LED leuchtet heller.

Notruf

Bei gesetzter Anwesenheit (gedrückte grüne Taste) erfolgt ein erneuter Ruf durch das Pflegepersonal, um weitere Hilfe anzufordern.

Ereignisse:

- Zimmersignalleuchte: Grüne LED leuchtet dauerhaft. Rote LED blinkt.
- Dienstzimmer-Display: Notruf wird (mit Informationen wie Zimmer-Nr.), im Display angezeigt.
- Dienstzimmer-Display: Akustisches Signal (Piepton) wird ausgelöst.
- Gerät der Rufauslösung (Taster): Rote LED leuchtet heller.

WC-Ruf

Ruf, der von Bewohnern durch Ziehen des Zugtasters im Bad/WC getätigt wird.

Ereignisse:

- Zimmersignalleuchte: Rote und weiße LED leuchtet dauerhaft.
- Dienstzimmer-Display: Ruf wird (mit Informationen wie Zimmer-Nr.), im Display angezeigt.
- Dienstzimmer-Display: Akustisches Signal (Piepton) wird ausgelöst.

WC-Notruf

Bei gesetzter Anwesenheit (gedrückte grüne Taste) erfolgt ein erneuter Ruf durch das Pflegepersonal, um weitere Hilfe anzufordern.

Ereignisse:

- Zimmersignalleuchte: Grüne und weiße LED leuchten dauerhaft. Rote LED blinkt.
- Dienstzimmer-Display: Notruf wird (mit Informationen wie Zimmer-Nr.), im Display angezeigt.
- Dienstzimmer-Display: Akustisches Signal (Piepton) wird ausgelöst.

Steckerwurf

Der Birntaster wurde vom magnetischen Steckkontakt gelöst.

Ereignisse:

- Zimmersignalleuchte: Rote LED leuchtet dauerhaft.
- Zimmerdisplays: Meldung „Steckerwurf“ wird in den Zimmerdisplays Display angezeigt.

Durch Wiederverbinden des Birntasters mit dem Ruftaster wird der „Steckerwurf“ gelöscht. Kann der Birntaster nicht mehr mit dem Ruftaster verbunden werden, muss der Steckerwurf wie in Punkt 3.2 beschrieben, gelöscht werden.

ZA-Ruf

Wurde ein Ruf 10 Minuten nach Auslösung nicht abgestellt, kommt es zum „Zeit-Ablauf“-Ruf. Dieser kommt unabhängig von der Rufart und wird im Display zusätzlich zur Rufart angezeigt.

ZAA-Ruf

Wurde ein Ruf 20 Minuten nach Auslösung nicht abgestellt, kommt es zum „Zeit-Ablauf-Ablauf“-Ruf. Dieser kommt unabhängig von der Rufart und wird im Display zusätzlich zur Rufart angezeigt.

2. ZIMMERKOMPONENTEN

Die aufgeführten Zimmerkomponenten und Merkmale in dieser Anleitung entsprechen der Basiskonfiguration. Je nach Einrichtung können die eingesetzten Komponenten und deren Funktionsweise von dieser Anleitung abweichen.

2.1 Zimmersignalleuchte

Die Zimmersignalleuchte signalisiert Rufe, Anwesenheiten und Störungen der Zimmer.


4 LEDs: rot, gelb, grün, weiß



Signal	Bedeutung	
●	Rot leuchtet dauerhaft	Normalruf, Diagnostikruf oder Steckerwurf
● ●	Rot und weiß leuchtet dauerhaft	WC-Ruf
● ●	Rot blinkt, grün leuchtet dauerhaft	Notruf
● ● ●	Rot blinkt, grün und weiß leuchten dauerhaft	WC-Notruf
●	Grün leuchtet dauerhaft	Anwesenheit gesetzt
●	Gelb leuchtet dauerhaft	Erinnerung gesetzt (optional)
○	Gelb blinkt	Störung

2.2 Zimmerdisplay

Auf dem LCD-Display in den Zimmern werden aktuelle Rufe in Klartext angezeigt. Zudem verfügt das Zimmerdisplay über eine rote, gelbe und grüne Taste.

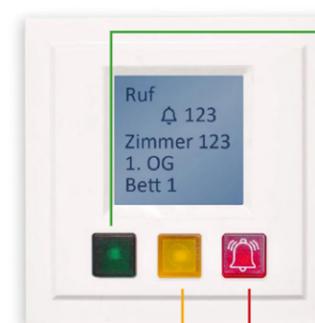

■ Anwesenheitstaste

Der Taster dient zum Ein-/Ausstellen der Anwesenheit und zum Abstellen von Rufen.

Bei Betreten des Zimmers nach einem Ruf, wird die grüne Taste 1x gedrückt, um die Anwesenheit von Pflegepersonal zu bestätigen und den Ruf zu löschen. Beim Verlassen des Zimmers wird die grüne Taste nochmals gedrückt, um die Anwesenheit wieder abzustellen.

■ Ruftaste

Wird die rote Taste betätigt, wird ein Normalruf ausgelöst. Ist die Anwesenheit eingeschaltet (grüne Taste leuchtet), wird durch Betätigen des Ruftasters ein Notruf ausgelöst, um weitere Hilfe anzufordern.

Die Taste leuchtet dauerhaft ganz leicht, um die Taste auch im Dunkeln sichtbar zu halten (Findelicht). Wird ein Ruf ausgelöst, leuchtet die Taste heller.

■ Erinnerungstaste

In der Regel wird diese zur Erinnerungsanzeige genutzt, um im jeweiligen Zimmer noch eine Aufgabe auszuführen. Es erfolgt keine weitere Übermittlung an Dienstzimmer/Personal.

2.3 Rufaster


Rufauslösung durch Drücken der roten Taste.

An der Ausführung mit Magnetsteckkontakt kann zusätzlich ein Birntaster oder Funk-/Diagnostibox angesteckt werden.

Artikelnummer

RA-FA-019

RA-FA-022 (mit Magnetsteckkontakt)

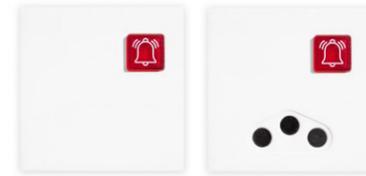

2.4 Anwesenheits- und Abstelltaster

Setzen der Anwesenheit oder Rufabstellung durch Drücken der grünen Taste.

Artikelnummer

RA-FA-050



2.5 Ruf- und Anwesenheitstaster


Auslösung eines Rufes mittels der roten Taste. Bei gesetzter Anwesenheit wird ein Notruf durch die rote Taste ausgelöst. Setzen der Anwesenheit und Rufabstellung mittels der grünen Taste.

An der Ausführung mit Magnetkontakt kann zusätzlich ein Birntaster oder Funk-/Diagnostibox angesteckt werden.

Artikelnummer

RA-FA-017

RA-FA-020 (mit Magnetsteckkontakt)

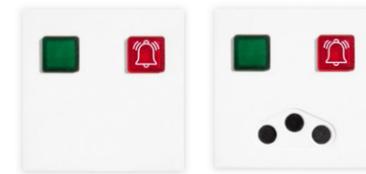

2.6 Ruf-/Abstelltaster Bad/WC

Wird die rote Taste betätigt, wird ein WC-Ruf ausgelöst. Mit der grauen Taste werden WC-Rufe abgestellt, keine Rufe vom Zimmer oder Bett.

Artikelnummer

RA-FA-054



2.7 Birntaster

Rufauslösung durch Drücken der roten Taste.

Beim Anstecken des Birntasters an einen Magnetsteckkontakt ist ein Piepen zu hören. Damit wird signalisiert, dass der Birntaster erfolgreich erkannt wurde. Steckt man den Birntaster ab, wird ein Steckerwurf ausgelöst.

Nähere Infos zum Steckerwurf finden Sie auf Seite 5. Informationen zum Anlernen/Auslernen von Birntastern finden Sie auf Seite 10.

Artikelnummer

Kabellänge 3 m: RA-FA-023 | RA-FA-074 (mit Lichtsteuerung)

Kabellänge 5 m: RA-FA-072 | RA-FA-075 (mit Lichtsteuerung)

Kabellänge 10 m: RA-FA-073 | RA-FA-076 (mit Lichtsteuerung)



2.8 Zugtaster

Mit dem roten Griff/Zugschnur wird ein WC-Ruf ausgelöst.

Der WC-Ruf wird mit der grauen Taste am Abstelltaster Bad/WC, nach gesetzter Anwesenheit am Ruf-/Anwesenheitstaster bzw. Zimmerdisplay, abgestellt.

Artikelnummer

RA-FA-021



2.9 Kombi-Zugtaster

Mit dem roten Griff/Zugschnur wird ein WC-Ruf ausgelöst.

Mit dem grünen Griff/Zugschnur wird der WC-Ruf, nach gesetzter Anwesenheit am Ruf-/Anwesenheitstaster bzw. Zimmerdisplay, abgestellt.

Artikelnummer

RA-FA-020



2.10 Pneumatiktaster

Durch Drücken des roten Balles wird ein Ruf ausgelöst. Der WC-Ruf wird mit der grauen Taste am Abstelltaster Bad/WC, nach gesetzter Anwesenheit am Ruf-/Anwesenheitstaster bzw. Zimmerdisplay, abgestellt.

Artikelnummer
RA-FA-031



3. BIRNTASTER ANLERNEN/AUSLERNEN

3.1 Birntaster anlernen

1. Birntaster an einen Magnetkontakt anstecken.
2. Nach ein paar Sekunden ist ein deutlicher Piepton zu hören.
3. Der Piepton signalisiert, dass der Birntaster erfolgreich erkannt wurde.

3.2 Birntaster auslernen

1. Birntaster von einem Magnetkontakt abziehen.
2. Nach ca. 20 Sekunden erfolgt ein Ruf „Steckerwurf“.
3. Die Anwesenheitstaste (grüne Taste) am Ruf-/Anwesenheitstaster bzw. Zimmerdisplay ca. 6 Sekunden gedrückt halten, bis ein deutlicher Piepton zu hören ist.
4. Der Piepton signalisiert, dass der Birntaster erfolgreich abgemeldet wurde.



4. FUNKBOX – KOMPONENTEN ANLERNEN

Schritt 1

Funkbox auf einen Taster mit Magnetsteckkontakt aufstecken.

Schritt 2

Im Lieferumfang der Cereda-Funkbox ist ein RJ10-Stecker mit Kabelbrücke enthalten. Stecken Sie diesen RJ10-Stecker in die RJ10-Buchse der Funkbox.

Schritt 3


Ziehen Sie den RJ10-Stecker wieder aus der Funkbox und lösen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Funksender aus. Dabei wird der Code in die Funkbox geschrieben und der Sender (z.B. Funksender, Funk-Trittmatte etc.) ist angelernt.

Soll ein anderer Sender eingelernt werden, wiederholen Sie die Schritte 2–3. Der vorherige Funkcode wird gelöscht und der neue gespeichert.



Funkbox

Artikelnummer
RA-FA-082

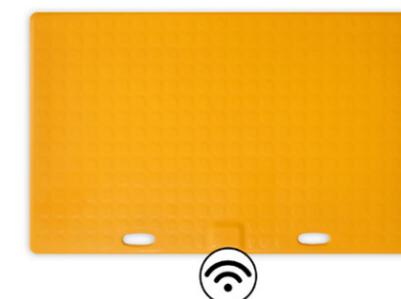

Funk-Trittmatte

Artikelnummer
RA-FA-094



Funk-Sender

Artikelnummer
Halsband: RA-FA-084
Armband: RA-FA-089



COMLINE Systemtechnik GmbH
Große Heide 3a
66399 Mandelbachtal

Telefon: 06803 995999-0
E-Mail: info@comline-pflege.de
www.comline-pflege.de

Folgen Sie **COMLINE**
für mehr Infos

